

特殊寝台（電動ベッド）

電動ベッドは、起き上がり・離床などの動作を助け、「寝たきりの生活」を防止するために用います。

利用者状態別選定ポイント

A B C D E このマークを目安に選べます。

Bさん



床上（布団）からの立ち上がりも可能ですが、手すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、自力で寝返りをし起き上がることは可能ですが、寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要となることがあります。

Cさん



床上（布団）からの立ち上がりは自力では不可能な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。移乗のためにベッドの高さ調整が必要です。

Dさん



ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整機能が必要です。


Eさん



ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

電動ベッドの機能

背上げ機能

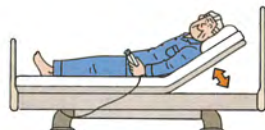


起き上がりの動作を助けます。

膝上げ機能



背上げするときに体がずれてしまうのを防ぎます。

高さ調節機能

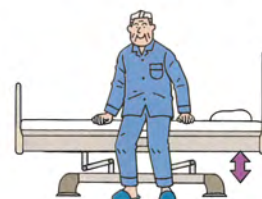

ベッドの床高を立ち上がりやすい高さに変え、立ち上がりの動作を助けます。

介護する方も楽な姿勢が取れるので、負担が軽減されます。



背・膝連動機能



背と膝の上げ下げを組み合わせることで、からだのずれや圧迫感が少なく、姿勢のずれにくい起き上がり動作ができます。

ラクリアーション



従来の背と膝の上げ下げを組み合わせた動きに、ベッド全体を傾かせる動きを加えることで、床ずれの発生要因となる起きあがり時の身体のずれや圧迫感を大幅に軽減するとともに、起きあがり後の姿勢をしっかりと保持します。

らくらくモーション



ひとつのボタン操作で、からだのズレにくく、安定した姿勢で起き上がることができます。背上げをしたあとに介護する方が姿勢を直す負担を軽減できます。

電動ベッドのサイズ

■幅

83cm

83cm



接近しやすく介護がしやすい。

91cm

91cm



ゆったりとしたスペースと介護のしやすさを両立。

100cm

100cm




大柄の方でも充分に寝返りができるゆったりとしたスペース。

■長さ

ミニ

180 cm

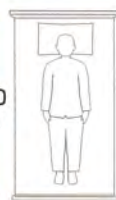

適応身長の目安
150cm未満

レギュラー


191 cm



適応身長の目安
150cm以上

ロング

205 cm

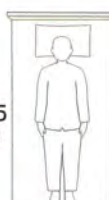

適応身長の目安
170cm後半から
※ロングサイズは、レギュラーサイズのベッドと延長フレームの組み合わせです。

各部名称とベッド付属品

マットレス 参照 P.18

ベッドの上に敷いて使用します。寝返りするためには硬めのものが適しており、体圧分散には柔らかいものの方が効果が高いという特徴があります。

テーブル 参照 P.26

ベッドの上に差し掛けて使用します。ベッドサイドレールに乗せて使用するものや、門型の足やフレームを持つものなどがあります。

ベッドサイドレール 参照 P.24

ベッドで寝ている人の転落予防、寝具の落下防止を目的にしております。

介助バー 参照 P.25

ベッドの側面に取り付けて、ベッドからの乗り降りの際に体を支えます。つかまったり寝返りなどの補助として活用することが目的なので、ネジで固定されています。

脚部 参照 P.13・14・16

ベッドを支える部分で、キャスターを取り付けることもできます。

在宅用電動介護用ベッドのJISマークについて



マークのある特殊寝台（電動ベッド）は、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”についてJIS規格に定められた寸法を順守しています。組み合わせについては必ずその商品に適合するオプション製品（ベッドサイドレールなど）をお使いください。



楽匠 Z

らくしろう Zシリーズ

JIS T 9254:2009



2014年
1月～
発売開始

NEW

ベッドでの姿勢は、
生きる姿勢につながっている。


いつまでもその人らしい生活を。

新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、
パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズでお応えします。

本カタログ掲載の楽匠Zシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの
組み合わせにおいてJIS規格（JIS T9254:2009）の認証を取得しています。



セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)

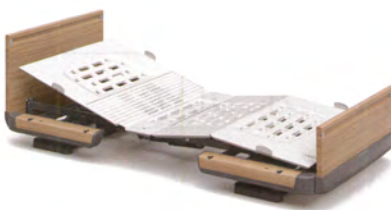

木製ボード



木製ボード ハイタイプ

POINT 1

身体がずれにくく、体圧を再分配 身体にやさしい起き上がり

背あげをするときのずり落ちを抑えて、体圧を床ずれリスクのもっとも高い仙骨部からお尻と太ももに移します。安定した姿勢で起き上がることができ、床ずれリスクにも配慮した新しい背あげの方法です。



身体がずれないように、まず膝をあげてから上体を起こしはじめます。



少し上体を起こしてから、ベッドが傾き始めます。



ベッドが10°傾くと、さらに上体を起こします。



上体を起こしながら膝を下げることで、骨盤の立った姿勢で起き上がります。

※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションの動作が異なります。

POINT 2

姿勢が崩れにくいから
リラックスできて、動きやすい

膝を少し曲げて、足を下げた背あげ姿勢になるので、骨盤が立って、安定した姿勢が維持しやすくなります。背もたれに頼ることが少なく、首や肩、腕が動きやすくなります。



※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションによる背あげ姿勢が多少異なります。

POINT 3

足が下がっているから離床しやすい

新しい背あげ姿勢は、脚を持ち上げたりしなくても、ベッドの外に足を降ろしやすくなっています。また、ベッドの下のスペースも広いので、立ち上がるときに十分に足を引くことができます。



POINT 4

天井から生活空間へ視界が広がる

骨盤の立った背あげ姿勢がとれ、フットボード側が低くなるため、ベッドで過ごしているときに天井方向に向かいがちだった視線が生活空間に向きやすくなります。また身体が動かしやすいため、視界も広がりやすくなります。



POINT 5

足元すっきり、もちろん介護もしやすい

ベッドの高さは最大で64.5cmまで上げることができるので、腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。ベッドの下のスペースが広いので、踏み込んで接近しやすい構造です。



※1モーションは高さ調節ができません。

POINT 6

液晶画面スイッチを全機種搭載

手元スイッチには、暗くても表示が見やすいように白色液晶を使用しています。



楽匠Zシリーズ

	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード (ハイトイプ)																																													
3モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7331</td><td>707725</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7311</td><td>707685</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7321</td><td>707705</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7301</td><td>707665</td></tr></table> TAIS コード00170-000785	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7331	707725	83cm 幅	KQ-7311	707685	91cm 幅 mini	KQ-7321	707705	83cm 幅 mini	KQ-7301	707665	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7332</td><td>707730</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7312</td><td>707690</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7322</td><td>707710</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7302</td><td>707670</td></tr></table> TAIS コード00170-000786	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7332	707730	83cm 幅	KQ-7312	707690	91cm 幅 mini	KQ-7322	707710	83cm 幅 mini	KQ-7302	707670	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7333</td><td>707735</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7313</td><td>707695</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7323</td><td>707715</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7303</td><td>707675</td></tr></table> TAIS コード00170-000787	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7333	707735	83cm 幅	KQ-7313	707695	91cm 幅 mini	KQ-7323	707715	83cm 幅 mini	KQ-7303	707675
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7331	707725																																														
83cm 幅	KQ-7311	707685																																														
91cm 幅 mini	KQ-7321	707705																																														
83cm 幅 mini	KQ-7301	707665																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7332	707730																																														
83cm 幅	KQ-7312	707690																																														
91cm 幅 mini	KQ-7322	707710																																														
83cm 幅 mini	KQ-7302	707670																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7333	707735																																														
83cm 幅	KQ-7313	707695																																														
91cm 幅 mini	KQ-7323	707715																																														
83cm 幅 mini	KQ-7303	707675																																														
2モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7231</td><td>707645</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7211</td><td>707605</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7221</td><td>707625</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7201</td><td>707585</td></tr></table> TAIS コード00170-000777	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7231	707645	83cm 幅	KQ-7211	707605	91cm 幅 mini	KQ-7221	707625	83cm 幅 mini	KQ-7201	707585	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7232</td><td>707650</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7212</td><td>707610</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7222</td><td>707630</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7202</td><td>707590</td></tr></table> TAIS コード00170-000778	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7232	707650	83cm 幅	KQ-7212	707610	91cm 幅 mini	KQ-7222	707630	83cm 幅 mini	KQ-7202	707590	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7233</td><td>707655</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7213</td><td>707615</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7223</td><td>707635</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7203</td><td>707595</td></tr></table> TAIS コード00170-000779	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7233	707655	83cm 幅	KQ-7213	707615	91cm 幅 mini	KQ-7223	707635	83cm 幅 mini	KQ-7203	707595
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7231	707645																																														
83cm 幅	KQ-7211	707605																																														
91cm 幅 mini	KQ-7221	707625																																														
83cm 幅 mini	KQ-7201	707585																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7232	707650																																														
83cm 幅	KQ-7212	707610																																														
91cm 幅 mini	KQ-7222	707630																																														
83cm 幅 mini	KQ-7202	707590																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7233	707655																																														
83cm 幅	KQ-7213	707615																																														
91cm 幅 mini	KQ-7223	707635																																														
83cm 幅 mini	KQ-7203	707595																																														
1モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7131</td><td>707565</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7111</td><td>707525</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7121</td><td>707545</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7101</td><td>707505</td></tr></table> TAIS コード00170-000769	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7131	707565	83cm 幅	KQ-7111	707525	91cm 幅 mini	KQ-7121	707545	83cm 幅 mini	KQ-7101	707505	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7132</td><td>707570</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7112</td><td>707530</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7122</td><td>707550</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7102</td><td>707510</td></tr></table> TAIS コード00170-000770	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7132	707570	83cm 幅	KQ-7112	707530	91cm 幅 mini	KQ-7122	707550	83cm 幅 mini	KQ-7102	707510	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm 幅</td><td>KQ-7133</td><td>707575</td></tr><tr><td>83cm 幅</td><td>KQ-7113</td><td>707535</td></tr><tr><td>91cm 幅 mini</td><td>KQ-7123</td><td>707555</td></tr><tr><td>83cm 幅 mini</td><td>KQ-7103</td><td>707515</td></tr></table> TAIS コード00170-000771	ベッド幅	型式	商品コード	91cm 幅	KQ-7133	707575	83cm 幅	KQ-7113	707535	91cm 幅 mini	KQ-7123	707555	83cm 幅 mini	KQ-7103	707515
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7131	707565																																														
83cm 幅	KQ-7111	707525																																														
91cm 幅 mini	KQ-7121	707545																																														
83cm 幅 mini	KQ-7101	707505																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7132	707570																																														
83cm 幅	KQ-7112	707530																																														
91cm 幅 mini	KQ-7122	707550																																														
83cm 幅 mini	KQ-7102	707510																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm 幅	KQ-7133	707575																																														
83cm 幅	KQ-7113	707535																																														
91cm 幅 mini	KQ-7123	707555																																														
83cm 幅 mini	KQ-7103	707515																																														

● 共通サイズ表

セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)


〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉



〈 〉 は1モーションの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

木製ボード


〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉

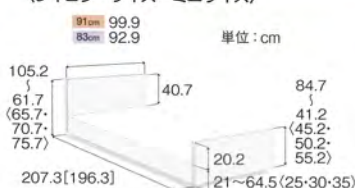

〈 〉 は1モーションの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

木製ボード (ハイトイプ)

〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉

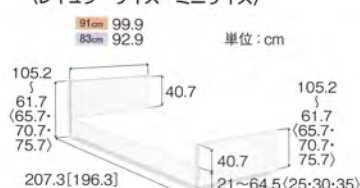

〈 〉 は1モーションの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

アクセスポート

パラマウントベッド

立ち上がりや移乗、室内の移動などさまざまな用途に対応します。目的に合わせて多様な組み合わせが可能です。



基本セット



型式	商品コード	TAIS コード
KQ-P70G	711100	00170-000795



垂直ポール



型式	商品コード	JAN コード
KQ-P70P	711105	4527799003273



歩行用手すり



型式	商品コード	JAN コード
KQ-P70T	711110	4527799003280



ボール手すり1台セット

基本セットと垂直ポールと歩行用手すり1台のセットです。

型式	TAIS コード
KQ-P70GF1	00170-000800



延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
91cm 幅	KQ-P72L	709225	00170-000793
83cm 幅	KQ-P70L	709220	00170-000792

JIS 認証取得

14cm長くなります

延長マットレスが別途、必要となります。



延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAIS コード
91cm 幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm 幅	KE-553L	709204	00170-000565



キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAIS コード
KQ-P70C	714065	00170-000794



JIS 認証取得

ベッドの高さが約3cm高くなります。



保険対応外商品

ホルダー付IVポール

パラマウントベッド

型式	TAIS コード
KC-56P70	00170-000844

※IVポール+IVポールホルダー

IVポール

型式	商品コード	TAIS コード
KC-56	718140	00170-000078

IVポールホルダー

型式	商品コード	TAIS コード
KQ-P70V	718155	00170-000843



ベッド付属品はこちらからお選びください

マットレス

参照 P.18

テーブル


参照 P.26

介助バー

参照 P.25

ベッドサイドレール

参照 P.24

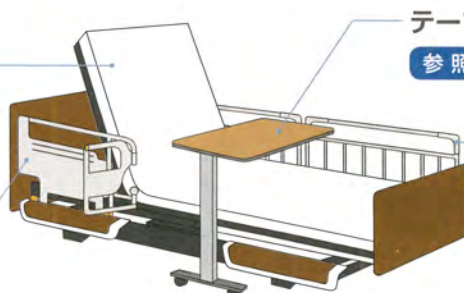

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

楽匠Sシリーズ



JIS T 9254:2009



ご本人にも、介護する方にも、安心してお使いいただけるベッド。
それが、楽匠Sシリーズです。
新たに、ゆとりの100cm幅ワイドサイズをラインアップ。

楽匠Sシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて
JIS規格（JIS T9254：2009）の認証を取得しています。



楽匠Sシリーズ 専用オプション

延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード	JIS認証取得
100cm幅	KQ-P94L	709210	00170-000681	
91cm幅	KQ-P92L	709201	00170-000526	
83cm幅	KQ-P90L	709202	00170-000525	

●楽匠Sシリーズ専用

<100cm>

<91・83cm>

14cm長くなります。
延長マットレスが別途、
必要となります。



延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557L	709207	00170-000661
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565

<100cm>

<91・83cm>



ハイト Spacer

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90H	714090	00170-000561

ベッドの高さが6.5cm高くなります。

JIS認証取得



キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90C	714055	00170-000560

ベッドの高さは変わりません。

JIS認証取得



ベッド付属品はこちらからお選びください

マットレス

参照 P.18

テーブル

参照 P.26

ベッドサイドレール

参照 P.24

介助バー


参照 P.25



●共通サイズ表

木製ボード


〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉

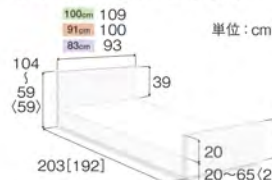

〈 〉 は1モーターの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

セーフティラウンドボード(樹脂製)

〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉

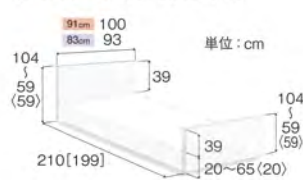

〈 〉 は1モーターの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

※ JIS認証取得 のマークのある製品は、楽匠Sシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)



木製ボード



木製ボード
ワイドサイズ



らくらく
モーション



ベッド幅	型式	商品コード
91cm 幅	KQ-9631	705011
83cm 幅	KQ-9611	705013
91cm 幅 mini	KQ-9621	705012
83cm 幅 mini	KQ-9601	705014

TAIS コード 00170-000517



ベッド幅	型式	商品コード
91cm 幅	KQ-9632	705001
83cm 幅	KQ-9612	705003
91cm 幅 mini	KQ-9622	705002
83cm 幅 mini	KQ-9602	705004

TAIS コード 00170-000513



ベッド幅	型式	商品コード
100cm 幅	KQ-9652	705020
TAIS コード	00170-000679	



3モーター



ベッド幅	型式	商品コード
91cm 幅	KQ-9331	705111
83cm 幅	KQ-9311	705113
91cm 幅 mini	KQ-9321	705112
83cm 幅 mini	KQ-9301	705114

TAIS コード 00170-000518



ベッド幅	型式	商品コード
91cm 幅	KQ-9332	705101
83cm 幅	KQ-9312	705103
91cm 幅 mini	KQ-9322	705102
83cm 幅 mini	KQ-9302	705104

TAIS コード 00170-000514



2モーター



ベッド幅	型式	商品コード
91cm 幅	KQ-9231	705211
83cm 幅	KQ-9211	705213
91cm 幅 mini	KQ-9221	705212
83cm 幅 mini	KQ-9201	705214

TAIS コード 00170-000519



ベッド幅	型式	商品コード
91cm 幅	KQ-9232	705201
83cm 幅	KQ-9212	705203
91cm 幅 mini	KQ-9222	705202
83cm 幅 mini	KQ-9202	705204

TAIS コード 00170-000515



ベッド幅	型式	商品コード
100cm 幅	KQ-9252	705220
TAIS コード	00170-000678	



1モーター



ベッド幅	型式	商品コード
91cm 幅	KQ-9131	705311
83cm 幅	KQ-9111	705313
91cm 幅 mini	KQ-9121	705312
83cm 幅 mini	KQ-9101	705314

TAIS コード 00170-000520



ベッド幅	型式	商品コード
91cm 幅	KQ-9132	705301
83cm 幅	KQ-9112	705303
91cm 幅 mini	KQ-9122	705302
83cm 幅 mini	KQ-9102	705304

TAIS コード 00170-000516



※ ☎ のマークのついた商品は、お問い合わせください。

アウラ電動ベッド(1モーター)

アウラ電動ベッド (1 モーター)

パラマウントベッド

電動で背中角度調節ができる
シンプルな1モーター電動ベッド




ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm 幅	KQ-51300	703230	00170-000593



ボタンで簡単に背ボトムの角度
を操作できます。
(膝ボトムは背ボトムに連動して
最大8°まで上がります)



ベッドの高さは組立時に3段階
(25cm(低)、29cm(中)、33cm(高))
のいずれかに設定できます

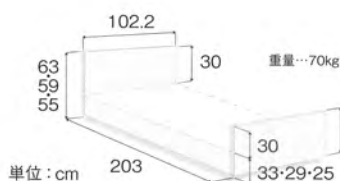

アウラ電動ベッド (KQ-51300) は、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて
JIS規格 (JIS T9254:2009) の認証を取得しています。

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-38A	714100	00170-000591



JIS 認証取得

ベッドの高さが
11.5cm 高くなります。



ハイトスペーサー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-37A	714105	00170-000601



JIS 認証取得

ベッドの高さが
7cm 高くなります。



ベッド付属品はこちらからお選びください

マットレス

参照 P.18

テーブル


参照 P.26

介助バー

参照 P.25

ベッドサイドレール

参照 P.24

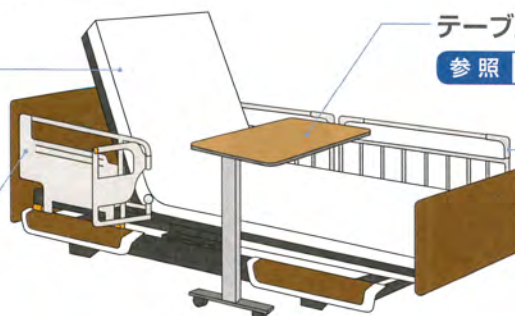

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、アウラ電動ベッド (KQ-51300) との組み合わせにおいて JIS 認証を取得しております。