

# 歩行補助つえ・歩行器の選び方

歩行補助つえ・歩行器などの移動支援用具の安全かつ適切な選定により、ご本人の活動意欲が高まり、社会参加するなど生活範囲の拡大につながります。

## 利用者例と歩行補助つえ・歩行器の種類

利用者例	種類	特徴
一本杖では不安定な方に。	四脚杖	支持面が広く安定性が高いつえです。
握力や手首の支えが弱い方に。	ロフトランドクラッチ	握りと前腕で支え安定するつえです。
手指・手関節へ負担を避けたい方に。	プラットホームクラッチ	前腕部で支えるつえです。
下肢への荷重が困難な方に。	松葉杖	上肢全体で支え、側方への安定性が高く、免荷に有効です。
バランスが悪く広い支持面が必要な方に。	サイドウォーカー	体の横で支え、安定性に優れます。

利用者例	種類	特徴
両腕の筋力があり、立位保持が可能だが、歩行不安定な方に。	固定型	持ち上げて前方に運び歩を進めるタイプです。
両手の動きと立位保持も可能な方に。	交互型	持ち上げるのではなく、左右交互に振り出して歩を進めるタイプです。
固定型を持ち運び使用したい方に。	折りたたみ型	固定型の折りたたみタイプ。小型・軽量のため体形・スペースに合わせて。
固定型を持ち上げるのが困難な方に。	キャスター付歩行器	固定型にキャスターが付いたタイプです。押しながら前進します。
両腕で支えられ立位バランスも良い方に。	歩行車	両腕で支えて押しながら使用します。
手の支えが弱く立位バランスも悪い方に。	サークル付(馬蹄型)	両手や肘で支え、からだをもたれながら使用します。
握る力や手による支えが弱い方に。	アーム付(前腕支持型)	前腕を支持台にのせて使用します。
ひとりで歩くことが可能な方に。	シルバーカー	荷物運搬の補助として便利です。

## 歩行補助つえの高さ調節のポイント

- 大腿骨 大転子の高さ ● 立位で腕を垂直におろしたときの手首の高さ ● (身長÷2) + 3cmの高さ
- つえ先を足先の15cm前外側についたときに肘を30度程曲げた高さ ※ 身体の状況、つえの種類により専門家へご相談下さい。

### 四脚杖 CMS-40M 松永製作所

屋内 **A B C D E**  
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
754010	00066-000221

- 長さ：71～93.5cm(10段階)
- 重量：1.02kg
- ベース：26.5×19cm



非課税

### 四脚杖 日進医療器

屋内 **A B C D E**  
屋外 **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
TY142L	754030	00175-000270
TY142S	754020	00175-000270

- 長さ：68.5～88.5cm(8段階)
- 重量：0.83kg ● ベース：20.5×14cm
- 長さ：54.5～74.5cm(8段階)
- 重量：0.8kg ● ベース：20.5×14cm



非課税

### 超軽量タイプ テトラ・ケイン 田辺プレス

屋内 **A B C D E**  
屋外 **A B C D E**

サイズ	商品コード	TAISコード
S	754155	01105-000001
M	754150	01105-000001

- 長さ：Sタイプ 60～75cm(16段階) Mタイプ 70～85cm(16段階)
- 重量：Sタイプ 0.42kg、Mタイプ 0.44kg
- ベース：22×16cm
- 材質：エラストマー(握り)、マグネシウム合金(支柱)



非課税

### ロフトランドクラッチ 松永製作所

屋内 **A B C D E**  
屋外 **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
CMS-60L	754045	00066-000194
CMS-60S	754050	00066-000193

- グリップ高さ：64.5～97.0cm ● 重量：0.575kg
- グリップ高さ：52.0～77.0cm ● 重量：0.510kg



非課税

### 松葉杖(中) CMS-80M 松永製作所

屋内 **A B C D E**  
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
754070	00066-000218

- 長さ：107.5～137.5cm(10段階)
- 重量：0.96kg

2本セット



非課税

### プラットホームクラッチ TY135D 日進医療器

屋内 **A B C D E**  
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
754090	00175-000259

- 長さ：83～108cm
- 重量：0.92kg



非課税

特殊寝台 特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

## 利用者状態別選定ポイント

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E  
このマークを目安に選べます。

Aさん



屋内移動は、独歩にて可能な方です。  
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して  
つえなどの支持物がが必要です。

Bさん



屋内歩行は、手すりやつえ、歩行器等の  
支持物の使用が安全な方です。  
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して、  
車いす使用の検討が必要です。

## 歩行車や歩行器の高さ調節のポイント

- 身体の前方や側方で握りを持ったとき肘が軽く曲がり、身体が少し前傾した姿勢に調整する
- 前腕で支持する場合は、肘を90度に曲げたときの肘の高さ ※ 身体の状況、歩行器の種類により専門家へご相談下さい

### サイドウォーカー MRB-02031 ミキ

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E

商品コード TAISコード  
742035 00122-000118

- サイズ：全幅42～44.5×奥行32～38×高さ74～86.5cm (6段階)
- 重量：1.65kg
- 材質：アルミ (一部スチール)



非課税

### アルコー2段ハンドル固定歩行器 星光医療器製作所

2段ハンドルで  
立ち上がりを  
サポートします

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E

商品コード TAISコード  
742025 00125-000033

- サイズ：全幅59～61×奥行48.5～49.5×高さ74～86.5cm
- 重量：2.6kg
- 材質：アルミ
- 折たたみ幅：11cm



非課税

### 固定型歩行器 アルコー 10型 星光医療器製作所

廊下や出入り口など、  
狭い住環境でも  
ご利用いただけます

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E

商品コード TAISコード  
742140 00125-000027

- サイズ：全幅45.5～47×奥行40～43.5×高さ62.5～75cm
- 重量：2kg
- 材質：アルミ
- 折たたみ幅：12cm



非課税

### 交互式歩行器 KSA イーストアイ

左右の握り手を  
交互に動かして  
歩行する歩行補助器

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E

商品コード TAISコード  
742040 00465-000018

- サイズ：全幅56×奥行49×高さ70～80cm
- 重量：3.1kg
- 材質：アルミ (一部スチール)



非課税

### スライドフィット H-0188 ユーバ産業

小柄な方から  
大きい方まで、  
ご使用いただけます

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E

商品コード TAISコード  
742160 01096-000005

- サイズ：全幅51～61.1×奥行48～50.8×高さ65～83cm
- 重量：2.8kg
- 材質：アルミ



非課税

### スライドフィット キャスター付 H-0193S ユーバ産業

小柄な方から  
大きい方まで、  
ご使用いただけます

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E

商品コード TAISコード  
742165 01096-000026

- サイズ：全幅53～61.2×奥行52.5～54.9×高さ74～84cm
- 重量：3.2kg
- 材質：アルミ



非課税

### セーフティアームウォーカー Lタイプ イーストアイ

型式 商品コード TAISコード  
SAWLR 742090 00465-000017

- サイズ：全幅63×奥行57×高さ79.5～89.5cm
- 重量：3.8kg
- 材質：アルミ (一部スチール)

SAWLSR 742115 00465-000054

- サイズ：全幅61×奥行55×高さ72～82cm
- 重量：3.7kg
- 材質：アルミ (一部スチール)

SAWLHR 742120 4515914302806

- サイズ：全幅64.5×奥行57×高さ88.5～98.5cm
- 重量：4.0kg
- 材質：アルミ (一部スチール)

折りたたみができ、  
収納・持ち運びに便利です



<SAWLR>

<SAWLSR・SAWLHR>



非課税

非課税

※ 地域によっては対応が出来ない場合がございます。

### アルコースタンダー 星光医療器製作所

片手で簡単に  
折りたためる  
軽量・コンパクト歩行車

屋内 A B C D E  
屋外 A B C D E

商品コード TAISコード  
744235 00125-000042

- サイズ：全幅46×奥行55～63.5×高さ75～85cm
- 重量：2.6kg
- 材質：アルミ製
- 折たたみ幅：12cm
- 最大使用者体重：80kg

キャスター径  
10cm



折りたたみ時  
自立可能

歩行器

折りたたみ歩行器 アルコー1S型 星光医療器製作所



在宅に使いやすい  
コンパクトサイズに設計

商品コード	TAISコード
744082	00125-000011

- サイズ：全幅51.5×奥行57×高さ87.5～107.5cm
- 重量：12.4kg
- 材質：スチール
- 折たたみ幅：22cm
- 最大使用者体重：80kg



非課税



キャスター径  
11cm

アルコーSK型 星光医療器製作所



高さ調整がワンタッチでおこなえる  
コンパクト歩行車  
グリップ・抵抗器・ガードバンパー付き

商品コード	TAISコード
742200	00125-000040

- サイズ：全幅53×奥行57.5×高さ79～106cm
- 重量：12kg
- 材質：本体フレーム/スチール
- 最大使用者体重：80kg



非課税



キャスター径  
10cm

ホップステップ SM-40 松永製作所



小回りが利くので  
移動がらくらく

商品コード	TAISコード
746000	00066-000150

- サイズ：全幅55～65×奥行72.5×高さ86～120cm
- 重量：14.4kg
- 材質：スチール
- 折たたみ幅：26cm
- 最大使用者体重：90kg



非課税



キャスター径  
10cm

レッツゴー 竹虎ヒューマンケア



便利なトレイとバスケット付の  
室内専用歩行車

商品コード	TAISコード
742170	00110-000098

- サイズ：全幅54×奥行60×高さ84～91.5cm
- 重量：7kg
- 材質：アルミ・スチール・プラスチック
- 最大使用者体重：80kg



キャスター径  
15cm

いす付き歩行車 KQ-180 パラマウントベッド



軽量で持ち運びにも便利  
収納力のあるバッグを装備


商品コード	TAISコード
744195	00170-000504

- サイズ：全幅58×奥行68×全高77～86cm
- 座面高：49～58cm (5段階調節)
- 重量：6.5kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg



キャスター径  
18cm

歩行車シンフォニーSP 島製作所

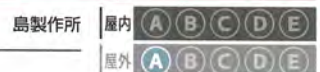

シルバーカー感覚で使える  
コンパクトな歩行車

商品コード	TAISコード
742055	00576-000014

- サイズ：全幅50×奥行56×高さ78.5～88cm
- 座面高：41cm ●重量：5.9kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg



キャスター径  
14.5cm

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

シンフォニーEVO 島製作所



使用しやすいコンパクト歩行車  
高さは、93cmのHIタイプ

商品コード	TAISコード
742195	00576-000036

- サイズ：全幅55×奥行61×高さ81～93cm
- 重量：5.9kg
- 材質：本体フレーム/アルミバインド粉体塗装仕上げ
- 最大使用者体重：75kg



キャスター径  
18cm

折りたたみ時

テイコブリトル 幸和製作所



本体幅がコンパクト  
狭い道でもスムーズに移動可能

商品コード	TAISコード
742185	00030-000099

- サイズ：全幅52×奥行64×高さ65～83cm
- 座面高：50cm
- 重量：5.0kg
- 材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル・ナイロン (チェックブルー)・ナイロン (ブラック)
- 最大使用者体重：75kg



キャスター径  
前輪18cm・後輪15cm

チェックブルー

ハンディウォーク

パラマウントベッド

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21002	770001	00170-000607
M	KZ-C21003	770010	00170-000687
S	KZ-C21001	770000	00170-000606

キャスター径  
20cm

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21008	00170-000691
M	KZ-C21007	00170-000690
S	KZ-C21006	00170-000689

スローダウン ブレーキキャスター	型式	商品コード
	KZ-C29007	746055

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21023	00170-000812
M	KZ-C21022	00170-000811
S	KZ-C21021	00170-000810

抑速ブレーキ キャスター	型式	商品コード
	KZ-329001	746090



折りたたみ時自立可能  
抑速機構を小型化し、車輪に内蔵。バッテリーなどの電源は一切不要。

- サイズ：全幅60(S/55.5cm)×奥行65cm
- 高さ：L/75~100cm、M/69~88cm、S/65~76cm
- 座面高：L/62cm、M/55cm、S/48.5cm
- 重量：L/7.1kg、M/6.9kg、S/6.5kg ●材質：アルミ

〈スローダウンブレーキ付〉



〈抑速ブレーキ付〉



ハンディウォーク アーム

パラマウントベッド

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

より身体を支えやすい  
アームサポート付き歩行車です

キャスター径  
20cm

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21005	770015	00170-000688

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21009	00170-000692

スローダウン ブレーキキャスター	型式	商品コード
	KZ-C29007	746055

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21025	00170-000814

抑速ブレーキ キャスター	型式	商品コード
	KZ-329001	746090




折りたたみ時自立可能

Point1 アームサポート


身長に合わせて、高さを調整可能。  
(98~115cm・7段階)

- サイズ：全幅60×奥行65cm
- 高さ：98~115cm
- 座面高：62cm
- 重量：10.6kg ●材質：アルミ

〈スローダウンブレーキ付〉

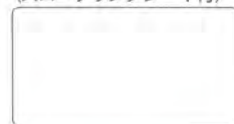

〈抑速ブレーキ付〉

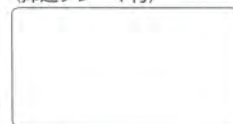

■抑速ブレーキ  
キャスター



抑速機構を小型化し、車輪に内蔵。バッテリーなどの電源は一切不要。

抑速ブレーキの特性

1. 必要となしただけ作動するので安心・快適
2. 抑速ブレーキ力の設定が簡単
3. 抑速ブレーキ力の再調整が不要
4. 耐久性・耐摩耗性が強み

■現状の歩行車



歩行車に追いつけずに『転倒!』

■抑速ブレーキ  
付き歩行車



急加速時に自動ブレーキ  
通常歩行時は軽～い歩行  
急加速時のみブレーキが作動して『転倒防止!』

ラビット歩行補助車 WA-2

ウェルパートナーズ

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

手の握力が弱く、また手の症状等でグリップが握れない方、  
上肢・体幹のバランスが不安定な方におすすめです

商品コード	TAISコード
744142	01009-000002

- サイズ：全幅51×奥行63×高さ76~96cm
- 座面高：46cm ●重量：8.3kg ●材質：アルミ、ステンレス製
- 折たたみ幅：40cm ●最大使用者体重：100kg

キャスター径  
18cm



非課税

ハッピーミニ

竹虎ヒューマンケア

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

横幅 50cm、狭い路地や室内でも  
扱いやすいコンパクトモデル

商品コード	TAISコード
744240	00110-000103

- サイズ：全幅50×奥行57.5×全高70~79cm
- 座面高：43cm ●重量：6.5kg
- 材質：本体フレーム/アルミニウム、座面部分/ポリプロピレン

キャスター径  
18cm



パールメタリック

歩行車ハッピー II XYAPRLOO1 B

竹虎ヒューマンケア

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

使用時の安定感と座り心地の良さがポイント

商品コード	TAISコード
744040	00110-000095

- サイズ：全幅55.5×奥行62×全高78~87cm
- 座面高：50cm ●重量：7.7kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

キャスター径  
19cm



非課税

ウォーキーS

ラックヘルスケア

屋内 A B C D E

屋外 A B C D E

折りたたんで自立収納

商品コード	TAISコード
744085	00245-000124

- サイズ：全幅55×奥行63×全高67~80cm
- 座面高：48cm ●重量：7.0kg
- 材質：アルミ、スチール粉体塗装
- 最大使用者体重：135kg

キャスター径  
20cm

